

IDEXX VetLab Station

快速参考指南

有关使用 IDEXX VetLab* Station 的更多信息（例如添加测试并检测、重新分配结果和输入 SNAP* 测试结果），请访问 idexx.com/product-info 和/或 learn.idexx.com。



导航到主界面


仪器状态图标

通过彩色图标了解哪些仪器正在检测和/或可用。

- **绿色（准备就绪）** - 已连接，正在通信
- **黄色（忙/待机）** - 使用中或待机模式
- **灰色（离线）** - 连接已断开
- **红色（警报）** - 出现问题 - 点击图标，了解更多信息

“待测样本”列表或“样本总数”列表

如果您有集成诊所信息管理系统 (PIMS)，则可以修改主屏幕设置，选择“待测样本”列表和/或“样本总数”列表；启用后，使用下拉箭头选择要显示的列表：

- **“待测样本”列表** - 查看已在集成的 PIMS 中提出申请的患宠列表，点击宠物名即可开始样本检测。您还可以使用删除图标  从“待测样本”列表中删除选定的患宠。
- **“样本总数”列表** - 查看已通过集成的 PIMS 入院的患宠列表，点击宠物名即可开始样本检测。

信息中心


点击  浏览 IDEXX 的通知。

IDEXX SmartService 指示灯

点颜色指示 IDEXX SmartService* 解决方案的连接状态：


- **绿色** - 已连接
- **黄色** - 正在连接中
- **灰色** - 已禁用
- **红色** - 离线

齿轮图标

点击  打开菜单，从中可访问仪器特定界面、自定义设置、获取帮助、浏览信息或关闭系统。



查看所有检测结果图标

点击  可按患宠查看其在院内的所有历史诊断结果。

“记录搜索”按钮

搜索特定病例。

检测结果列表

查看过去 7 天内生成的院内患宠检测结果列表。点击选择一名患宠，浏览或打印其结果。

搜索按钮

点击该按钮，在“待测样本”或“样本总数”列表（以显示的为准）中搜索特定患宠并开始样本检测。


添加/检测样本按钮

点击该按钮可手动输入患宠信息并开始样本检测。



“进行中”列表

查看当前正在进行、等待进行或需要操作的检测。

使用集成的 PIMS 开始样本检测

1. 从主屏幕的待测样本或样本总数列表中点击所需的患宠，或点击  以在待测样本或样本总数列表中搜索患宠。
2. 选择所需的仪器，并点击检测。

在 IDEXX VetLab Station 上直接开始样本检测

1. 点击主屏幕上的  或 。
2. 选择/输入患宠信息：
 - + 如果是新患宠 - 点击添加新患宠，输入患宠/宠主信息后点击下一步。然后，确认/指定患宠/诊所信息，选择所需的仪器，并点击执行。
 - + 如果是现有患宠 - 请点击患宠、姓或病历号方框，然后开始输入相应信息。点击以从列表中选择所需的患宠并点击下一步。然后，确认/指定患宠/诊所信息，选择所需的仪器，并点击执行。
 - + 如果是急诊患宠 - 点击急诊。选择种属和生命阶段。系统自动输入唯一的时间戳，以标识患宠（可在后期重新分配测试结果时使用）。点击下一步。
3. 选择所需的仪器并点击检测。

输入/编辑手动 SNAP 测试结果

输入手动 SNAP 测试结果：

1. 点击“进行中”列表中的 SNAP 图标，或点击“SNAP 计时完成”对话框中的输入结果。
2. 点击与 SNAP 测试结果窗口匹配的图像。
3. (可选) 点击备注选项，然后输入用户 ID 并添加该测试结果的备注。
4. 点击保存。

编辑 SNAP 测试结果：

1. 在结果屏幕中，点击管理结果。
2. 点击编辑手动结果，然后选择 SNAP 测试结果并编辑。
3. 执行变更并点击保存。

输入手动理化尿液特性




在检测期间添加理化尿液特性：

1. 开始尿液检测分析。
2. 当提示选择所需的仪器图标时，点击手动尿液分析图标，然后选择样本的采集方法、颜色和透明度。
3. 输入样本的比重。
4. 点击与样本 pH 匹配的颜色。
5. 如果所有化学特征均正常，点击全部设置为阴性/正常，否则请具体说明适当的结果。（如果只更改部分结果，完成后请点击下一步。）
6. 输入任意备注并点击完成。

编辑手动尿液分析特性：


1. 在结果屏幕中，点击管理结果。
2. 点击编辑手动结果，然后选择要编辑的手动尿液分析结果。
3. 执行变更并点击保存。

浏览和打印结果


1. 执行以下操作之一：
 - + 要在检测完成后立即查看结果，请点击“新检测结果”提示消息。
 - + 要查看过去 7 天内采集的检测结果，请在主屏幕的“检测结果”列表中点击相应患宠名。
 - + 要查看历史检测结果：
 - 在主屏幕的“检测结果”下，点击记录搜索或点击 ，搜索并选择目标患宠，然后点击查看。
 - 在主界面之外的任意屏幕上，点击 ，搜索并选择目标患宠，然后点击查看。
2. 点击包含所需结果的选项。
3. 点击  并打印所选选项卡中所有测试结果的综合报告。

每周维护

IDEXX 建议您每周重启系统。

1. 点击 ，然后点击关机。
2. 点击关机或重启。

自定义设置

可以对 IDEXX VetLab Station 进行自定义设置，以满足自己的实际需求。点击 ，再点击设置。