


# Catalyst\* SmartQC\* 质控品

## 快速参考指南

### 存储和处理要求

- + 无需回温或制备液体 - 自冰箱冷藏室取出后直接使用。
- + 储存在冰箱冷藏室中。不可冷冻。
- + 袋子未打开的情况下可在室温下储存最多8小时，最多5次。8小时后，请将未使用和未打开的试剂片及试剂放入冰箱冷藏室中。
- + 如果意外冷冻：
  - + <8小时，使用前在室温下解冻至少60分钟。
  - + >8小时，丢弃。

### Catalyst SmartQC便捷检测 - 即装即用

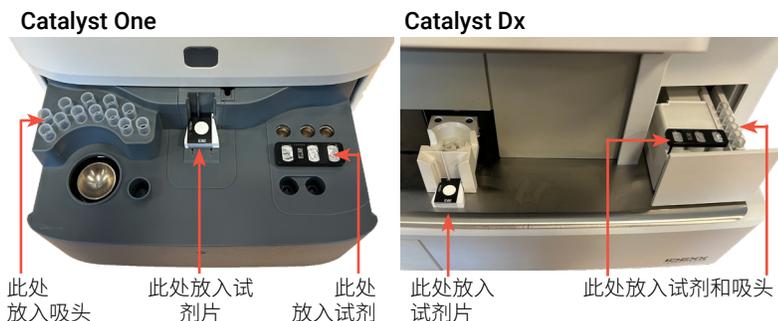

### 常见问题解答

问题	回答
Catalyst SmartQC质控品是什么?	Catalyst SmartQC质控品是用于验证Catalyst One*生化分析仪或Catalyst Dx*生化分析仪是否正常工作的质控材料 (Catalyst CLIP和试剂包)。
什么时候应该使用Catalyst SmartQC?	Catalyst SmartQC应每月执行一次，并在清洁分析仪内部组件后、安装时或每次移动了分析仪时执行。
如何运行Catalyst SmartQC?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 清洁Catalyst分析仪的内部组件。</li><li>2. 使用Catalyst One: 点击IDEXX VetLab* Station主屏幕上的<b>Catalyst One</b>图标，然后点击<b>Maintenance (维护) &gt; SmartQC &gt; Run SmartQC (执行SmartQC)</b>。 或者 使用Catalyst Dx: 点击IDEXX VetLab Station主屏幕上的<b>Catalyst Dx</b>图标，然后点击<b>SmartQC &gt; Run SmartQC (执行SmartQC)</b>。</li><li>3. 按照IDEXX VetLab Station (Catalyst One)或Catalyst Dx触摸屏(Catalyst Dx)上的屏幕说明，将SmartQC材料装载到分析仪中并完成运行。</li></ol>
能否将Catalyst SmartQC与宠物样本或其他Catalyst CLIP/试剂片一起检测?	不能，只能装载吸头和Catalyst SmartQC CLIP以及用于质控运行的试剂 - <b>不要</b> 装载样本杯、全血分离杯或其他CLIP/试剂片 (包括每月质控中曾经需要的Catalyst* Lyte 4 CLIP)。
Catalyst SmartQC检测需要多长时间?	检测开始后大约15分钟内可获得Catalyst SmartQC结果。
Catalyst SmartQC会提供结果吗?	会，Catalyst SmartQC检测会提供“pass (通过)”或“out of range (超出范围)”两种结果： <ul style="list-style-type: none"><li>+ <b>“Pass (通过)”</b>结果确认了您的分析仪处于理想工作状态，您可以根据需要继续使用分析仪。</li><li>+ <b>“Out of range (超出范围)”</b>结果表明在检测过程中发现了问题。如果您收到了“out of range (超出范围)”结果，请使用Catalyst SmartQC试剂片和试剂重新检测。如果第二次检测还是“out of range (超出范围)”，请联系IDEXX客户服务和技术支持部门获取帮助。</li></ul>
当需要在分析仪上执行Catalyst SmartQC时，如何给自己发送提醒?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用Catalyst One: 点击IDEXX VetLab Station主屏幕上的<b>Catalyst One</b>图标，然后点击<b>Maintenance (维护) &gt; SmartQC</b>。 或者 使用Catalyst Dx: 点击IDEXX VetLab Station主屏幕上的<b>Catalyst Dx</b>图标，然后点击<b>Quality Control (质控品)</b>。</li><li>2. 在屏幕左侧，使用适用的下拉列表选择您希望何时收到定期提醒消息。</li></ol>