

IDEXX VetLab Station

快速参考指南

有关使用 IDEXX VetLab* Station 的更多信息（例如添加测试并检测、重新分配结果和输入 SNAP* 测试结果），请访问 idexx.com/product-info 和/或 learn.idexx.com。



导航到主界面

仪器状态图标

通过彩色图标了解哪些仪器正在检测和/或可用。

- **绿色（准备就绪）** — 已连接，正在通信
- **黄色（忙/待机）** — 使用中或待机模式
- **灰色（离线）** — 连接已断开
- **红色（警报）** — 出现问题—点击图标，了解更多信息

消息中心

点击 浏览 IDEXX 的通知。

IDEXX SmartService 指示灯

点颜色指示 IDEXX SmartService* 解决方案的连接状态：

- **绿色**—已连接
- **黄色**—正在连接中
- **灰色**—已禁用
- **红色**—离线

齿轮图标

点击 打开菜单，从中可访问仪器特定界面、自定义设置、获取帮助、浏览信息或关闭系统。

省略号 (...)

点击“...”查看样本总数或从待处理列表中删除选项。

待处理列表

查看哪些患宠已在诊所管理系统 (PIMS) 中提出申请。



记录搜索

搜索患宠记录。

结果

查看过去7天内生成的院内患宠结果列表。点击选择一名患宠浏览或打印其结果。

搜索并添加按钮

点击 **搜索** 在待处理列表中搜索患宠。
点击 **添加** 手动输入患宠信息。

进行中区域

查看哪些测试是当前正在检测、等待检测或需要操作。

用集成 PIMS 开始样本检测

1. 从主界面的**待处理**或**样本总数**列表中点击所需的患宠，或点击  以在**待处理**列表中搜索患宠。
2. 选择所需的仪器，并点击**检测**。

在 IDEXX VetLab Station 上直接开始样本检测

在主界面上点击 ，然后：

如果是新患宠：

1. 点击**添加新患宠**，输入患宠/客户信息，并点击**下一步**。
2. 确认/说明患宠/实际信息，选择所需的仪器，并点击**检测**。

如果是现有患宠：

1. 点击**患宠**、**姓氏**或**客户 ID**选项框，然后开始输入适用信息。点击以从列表中选择所需的患宠，然后点击**下一步**。
2. 确认/说明患宠/实际信息，选择所需的仪器，并点击**检测**。

如果是急诊患宠：

1. 点击**统计**。
2. 选择**种属**和**生命阶段**。系统自动输入唯一的时间戳，以标识患宠（可在后期重新分配测试结果时使用）。
3. 点击**下一步**。
4. 选择所需的仪器并点击**检测**。

输入/编辑手动 SNAP 测试结果

输入手动 SNAP 测试结果：

1. 点击进行中区域的**SNAP**图标，或点击 SNAP 计时器完成对话框中的**输入结果**。
2. 点击与 SNAP 测试结果窗口匹配的图像。
3. （可选）点击**备注**选项，然后输入用户 ID 并添加该测试结果的备注。
4. 点击**保存**。

编辑 SNAP 测试结果：

1. 在结果屏幕中，点击**管理结果**。
2. 点击**编辑手动结果**，然后选择 SNAP 测试结果并编辑。
3. 执行变更并点击**保存**。

输入手动理化尿液特性

在检测期间添加理化尿液特性：

1. 开始尿液检测分析。
2. 当提示选择所需的仪器图标时，点击**手动尿液分析**图标，然后选择样本的采集方法、颜色和透明度。
3. 输入样本的比重。
4. 点击与样本 pH 匹配的颜色。
5. 如果所有化学特征均正常，点击**全部设置为阴性/正常**，否则请具体说明适当的结果。（如果只更改部分结果，完成后请点击**下一步**。）
6. 输入任意备注并点击**完成**。

编辑手动尿液分析特性：

1. 在结果屏幕中，点击**管理结果**。
2. 点击**编辑手动结果**，然后选择要编辑的手动尿液分析结果。
3. 执行变更并点击**保存**。

浏览和打印结果

1. 执行以下操作之一：
 - + 点击主界面上结果列表中的患宠。
 - + 点击新结果警报消息。
 - + 在主界面的结果项下，点击  **记录搜索**，搜索并选择所需的患宠，然后点击**浏览**。
2. 点击包含所需结果的选项。
3. 点击  并打印所选选项卡中所有测试结果的综合报告。

每周维护

IDEXX 建议您每周重启系统。

1. 点击 ，然后点击**关机**。
2. 点击**关机**或**重启**。

自定义设置

可以对 IDEXX VetLab Station 进行自定义设置，以满足自己的实际需求。点击 ，然后点击**设置**。